

IPJ-Fix ring


指関節安定性補助リング



意匠登録済 補装具完成用部品指定




- ・指関節の屈曲を制限せず過伸展や不安定性を抑制します
- ・材質はシルバー950・ロジウムメッキ仕上げなので普通の指輪との違和感がありません。
- ・調整可能な5サイズが用意されており装具士が調整して使用します。
- ・リングの形状は二種類ありますので患者さんの病態および生活様式等により選択が可能です。
- ・御用命は、貴院へ出入りの義肢装具会社さまへお願いします。

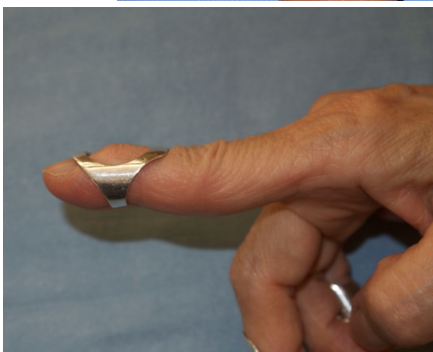

考案・写真提供;おくつ整形外科クリニック 奥津一郎先生

IPJ-Fix ring

サイズ一覧表

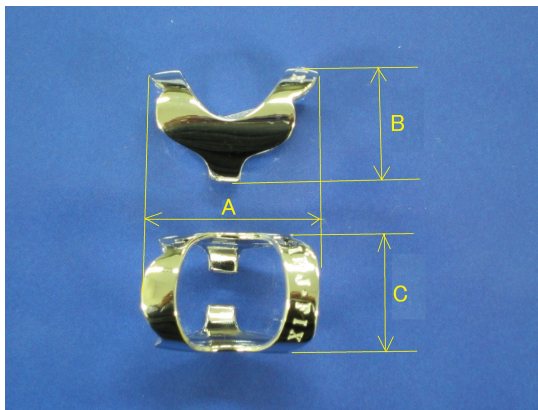

IIタイプ



SPタイプ

	IIタイプ			SPタイプ		
	A	B	C	A	B	C
SSサイズ*	18	14	16	18	13	13
Sサイズ*	24	16	17	23	15	16
Mサイズ*	25	17	18	27	17	17
Lサイズ*	31	18	21	32	19	20
LLサイズ*	38	23	22	36	19	20



使用上の注意

・連続装着などにより、指の腫れ・知覚障害(痺れ・痛み)循環障害などを認めた場合は、適宜はずしてください。

・体質により、かゆみ・かぶれなどが生じる場合があります。皮膚に異常を感じた場合には使用を中止し医師にご相談ください。

・医師の指示の元に、装具士などの専門家と相談の上で使用してください。

タクト医療株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-16-1

Tel.03-5644-8711

Fax.03-5641-5814

